



LED表示

各LEDの点灯・点滅状態

- ランプ(赤)
正しく計測ができないなど、使用する上で問題がある状態を表します。
- ランプ(緑)
同左の状態や、アプリケーションからの操作が可能な状態を表します。
- ランプ(青)
電源が入った状態や動作の状態を表します。



点灯 ● ● ● 点滅 ● ● ●

| LED表示 | 状態 | 実施していただきたい操作 |
|--------------------------|---|--|
| 赤、緑、青 同時点滅 1秒間隔 |  <ul style="list-style-type: none"> ・電池接続後初回のスイッチによる電源ON操作後 ・スイッチ長押し1分間による強制リセット後 に表示され時刻同期を必要とする状態を示します | PCアプリから時刻同期をしてください 時刻同期の方法： Silmees™ Bar type LiteをPCと接続してPCアプリの[管理]メニュー-> [動作設定]-> [計測条件設定]を開き、計測条件の設定を行うことで、PCの時計と時刻同期ができます。 |
| 赤 2連続点滅 3秒間隔 |  電池残量が少ない状態 | 専用のクレードルを使って充電をしてください |
| 赤 3連続点滅 3秒間隔 |  <ul style="list-style-type: none"> ・FWアップデート後(Flashメモリ初期化必要) ・計測データが14個保存された次のオフライン計測開始時 など本体に計測データを保存できない状態 | PCアプリと接続してデータを削除してください |
| 赤 点滅 0.5秒間隔 |  HW異常(センサー、通信) 電池残量低下表示からさらに使用したとき | 本体のスイッチを1分間長押しして強制リセットをしてください 強制リセット後に再度電源をONしますと赤、青、緑ランプ3色が同時に点滅し本体の時刻を求める状態となりますので、時刻の同期を行ってください。 本体リセットを行っても既に記録した内容は消去されません。 |
| 青 1回点滅 3秒間隔 |  PCアプリからのメモリ消去操作及びデータアップロード操作中に表示され <ul style="list-style-type: none"> ・記録済みデータ消去中 ・Flashメモリ初期化中 ・データアップロード中 を示します。 | 正常な動作です。 |
| 青 点灯 |  スwitch操作で電源ONにした際に表示され、 <ul style="list-style-type: none"> ・電源ON状態 ・Bluetooth接続待ち状態 を示します。 | 計測を行う場合は電源をOFFにした後、緑ランプが点灯するまで電源ボタンを長押しして計測を開始してください。 |
| 青 点滅 計測開始から 5分間 |  オンライン計測中の最初の5分間、装着者の心拍または脈拍にあわせて点滅 | 正常な動作です。 |
| 緑 点灯 |  <ul style="list-style-type: none"> ・PCとUSB接続中 に表示され アプリケーションから操作可能になった状態を示します。 | 正常な動作です。 |
| 緑 3連続点滅 1回のみ |  オフライン計測中にスイッチ短押しをした際に表示されオフライン計測中であることを示します | 正常な動作です。 |
| 全て消灯 | PCアプリからの各種操作時に USB通信中であることを示します。 | 正常な動作です。 |