

EXNAS (エクナス) D1

【禁忌・禁止】


- ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器、又は脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している人は誤作動を招く恐れがありますので使用しないでください。
- 磁石を取り出す行為など、機器の分解、改造はしないでください。
- アクセサリ一部は誤飲の危険がある為、12歳以下の小児や児童もしくは監督が必要な人の手の届く場所に置かないでください。万一誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受け、指示に従ってください。
- アクセサリ一部に、当社が指定する製品以外取り付けしないでください。
- 他の治療器と同時に使用しないでください。

【形状・構造等及び原理等】

1. 形状及び材質

ネックレス

- ・磁石: 希土類磁石
- ・ループ: シリコン樹脂
- ・留め具: ステンレス
- ・アクセサリ一部: ステンレス

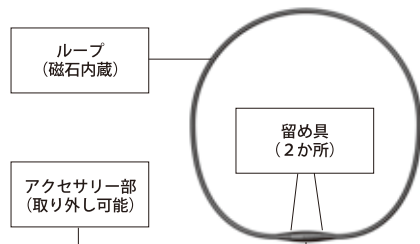

2. 動作原理

永久磁石の磁力線を利用して、人体に磁力線を浸透させて治療します。

3. 仕様

最大磁束密度: 160mT(ミリテスラ)

【使用目的又は効果】

装着部位のこり及び血行の改善。一般家庭で使用すること。

【使用方法等】

ご使用に当たっては、取扱説明書をよくお読みになってご使用ください。また、機器に異常がないか確認してからご使用ください。

使用方法

直接肌に触れるように首にかけてください。

【使用上の注意】

1. 医師の治療を受けている人や次の人は必ず医師と相談のうえご使用ください。

- (ア) 悪性腫瘍のある人
- (イ) 心臓に障害のある人
- (ウ) 妊娠初期の不安定期又は出産直後の人
- (エ) 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- (オ) 皮膚に感染症又は創傷のある人
- (カ) 安静を必要とする人
- (キ) 体温38℃以上(有熱期)の人
 - 例1. 急性炎症症状「けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など」の強い時期
 - 例2. 衰弱しているとき
- (ク) ねんざ(捻挫)、肉離れなどの急性「とう(疼)痛性」疾患の人

2. 使用しても効果が現れない場合は医師などの専門家に相談してください。

3. 頭部に使用しないでください。

4. 使用する前には次のことにご注意ください。

- (ア) 時計、磁気カードなどの磁気の影響を受けるものには近づけないでください。
- (イ) ループに破れなどがなく点検して頂き、破れなどがある場合は使用しないでください。
- (ウ) 表面に金属などの異物が吸引付着していないことを確認してください。

5. 使用中には次のことにご注意ください。

- (ア) 機器に故障が発見されたときは、使用を直ちに中止してください。
- (イ) 身体に異常を感じたときは、使用を直ちに中止してください。
- (ウ) 装着部に発しん(疹)、発赤、かゆみなどの症状が現れたときは、使用を直ちに中止してください。
- (エ) 磁気共鳴画像診断装置(MRI)の検査を受ける方は、検査中は取り外してください。
- (オ) やけどの恐れがあるので、サウナや火気のそばなど温度の高い環境で使用しないでください。

6. 機器を廃棄するときには、お住まいの市町村の廃棄方法に従ってください。

7. 機器の故障及び取り扱いには次のことにご注意ください。

- (ア) 機器が故障したときは、自ら修理など行わず、当社カスタマーサポートセンターにご連絡ください。

8. ネックレス以外の用途では使用しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

12歳以下の小児や児童及び監督を必要とする人の手の届かない場所に保管してください。

- ・アクセサリ一部の誤飲の恐れがあります。
- ・いたずらなどで思わぬけがをすることがあります。

【保守・点検に係る事項】

常に使用前後の点検を励行し、機器に異常が発見された場合にはすぐに使用を中止し、当社カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

【包装】

1個入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名

TDK株式会社

〒272-8558 千葉県市川市東大和田二丁目15番7号

取扱説明書

■ご使用前に本書をよくお読み頂き正しくご使用ください。

■また、裏面の文書も必ずお読みください。

■使用方法

【使用前】

ご使用のたびに、ループに金属片(針やピン等)の付着がないか確認してください。(鋭利な金属片が付着したまま装着すると、けがをする恐れがあります。)


【機器の装着及び脱着方法】

アクセサリ部を下にして装着してください。

左右両方から装着及び脱着が可能です。


◎良い例

留め具の根本とアクセサリ部を指で
持って水平に引っ張って外してください

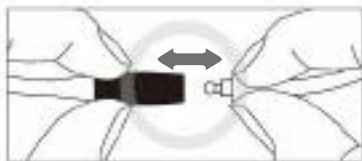

×悪い例

ループ部分のみを引っ張らないで
ください

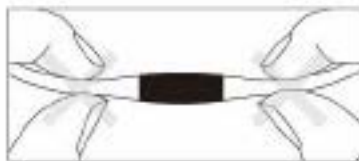

【使用中】

次のような場所や状況で使用しないでください。

・プール・入浴・温泉浴・海水浴・サウナ、火気のそばなど温度の高いところ

【使用后】

- 汗・皮脂・汚れなどが付着したままのご使用は劣化の原因となりますので、水又はぬるま湯で軽く洗い流して、水気を拭き取り、完全に乾いてからご使用ください。石鹸や洗剤での洗浄及び漂白剤の使用は劣化や色落ちの原因となります。
 - 色移りの可能性がある為、濡れた衣服等と一緒に放置しないでください。
 - 洗濯機・乾燥機・電子レンジ等で洗浄及び乾燥をさせないでください。
 - 長時間ぬれた状態や水に漬けた状態で放置しないでください。
- ご使用者の安全のために、一定以上の負荷が加わると破損するよう設計されています。その為、ループを強く引っ張るとループが切れる恐れがあります。

⚠ 禁忌・禁止

- ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器、又は脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している人は誤作動を招く恐れがありますので使用しないでください。
- 磁石を取り出す行為など、機器の分解、改造はしないでください。
- アクセサリ部は誤飲の危険がある為、12歳以下の小児や児童もしくは監督が必要な人の手の届く場所に置かないでください。
- 万一誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受け、指示に従ってください。
- アクセサリ部に、当社が指定する製品以外取り付けしないでください。
- 他の治療器と同時に使用しないでください。

⚠ 注意

- 時計、磁気カードなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。
- 首筋に湿疹や傷などがある場合は使用しないでください。(悪化の恐れがあります。)
- 使用中に皮膚など体調に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し医師に相談してください。
- やけどの恐れがあるので、サウナや火気のそばなど温度の高い環境で使用しないでください。
- 火気のそばに置かないでください。

製品保証書

本書は必ずお読み頂き大切に保管をしてください。

本規定に基づいた保証をお受けになる場合には、以下の保証条件等をご確認の上、販売店又は当社お問い合わせ先にお問い合わせください。

保証規定

- 取扱説明書に基づくお客様の正常なご使用状態のもとで保証期間内に万が一故障した場合無料にて同等品とお取り換えいたします。本製品と保証書をご用意の上、当社カスタマーサポートセンター(0120-455-750)にご相談ください。
- 保証の範囲は、磁気ネックレス本体です。
- 本製品の故障又はその使用によって生じた、直接・間接の損害については、当社はその責を負わないものとします。
- 次の場合には、保証期間内でもお取り換えに応じかねます。
 - 本保証書のご提示が無い場合
 - 本保証書にお買い上げ日の記入がない場合又は字句を書き換えられた場合
 - 取扱説明書に記載されている使用方法または注意事項を逸脱した使用による故障や損傷
 - 使用による汚れ、キズ、摩耗、塗装面及びメッキ部の摩耗や打痕
 - 製品の改造、修理、当社指定品以外との組み合わせによる故障や損傷
 - 使用環境や使用条件に起因する色落ち、汚れ、故障又は損傷
 - 地震や台風、火災など天変地異による故障や損傷
 - 本体の紛失(アクセサリ部だけの紛失含む)
- 交換依頼される場合のお願い
お問い合わせ先にご相談ください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

◆この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおける無料交換をお約束するものです。この保証書により保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

| | |
|--|---|
| 保証期間 | お買い上げ日から 6ヶ月間 |
| ※お買い上げ日 | 年 月 日 |
| 販売名 | EXNAS (エクナス) D1 |
| ★お客様名 (ふりがな) | 様 |
| ★ご住所 | |
| ★Tel 保証書にご記入がない場合は無効となりますので、★印欄をご記入くださいますようお願いいたします。 | |
| ※販売店名 | |
| ※お買い上げ日の証明となる販売証明書や販売店名およびお買い上げの日がわかる領収書、納品書等が必要となりますので、紛失しないように保証書と一緒に保管のうえ、ご提示ください(当該販売証明書等も保証書の一部とみなします。) | |
| 製造販売元 | TDK株式会社 |
| 個人情報について | 16歳未満のお客様は、保護者の同意を得た上でご記入ください。ご記入頂いた情報はTDK又はTDKからのサポート業務委託会社が行うサポートサービス、安全点検活動、新製品のご案内等の為に利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。尚、ご案内等送付の際に必要な情報を委託先に預託する事があります。ご案内の送付が不要になった場合や、お客様登録後の住所変更等は、当社お問い合わせ先までご連絡をお願いします。 |